




Lecteur de tests rapides

SkaniFlexi®

Interprétation et Archivage de vos résultats.

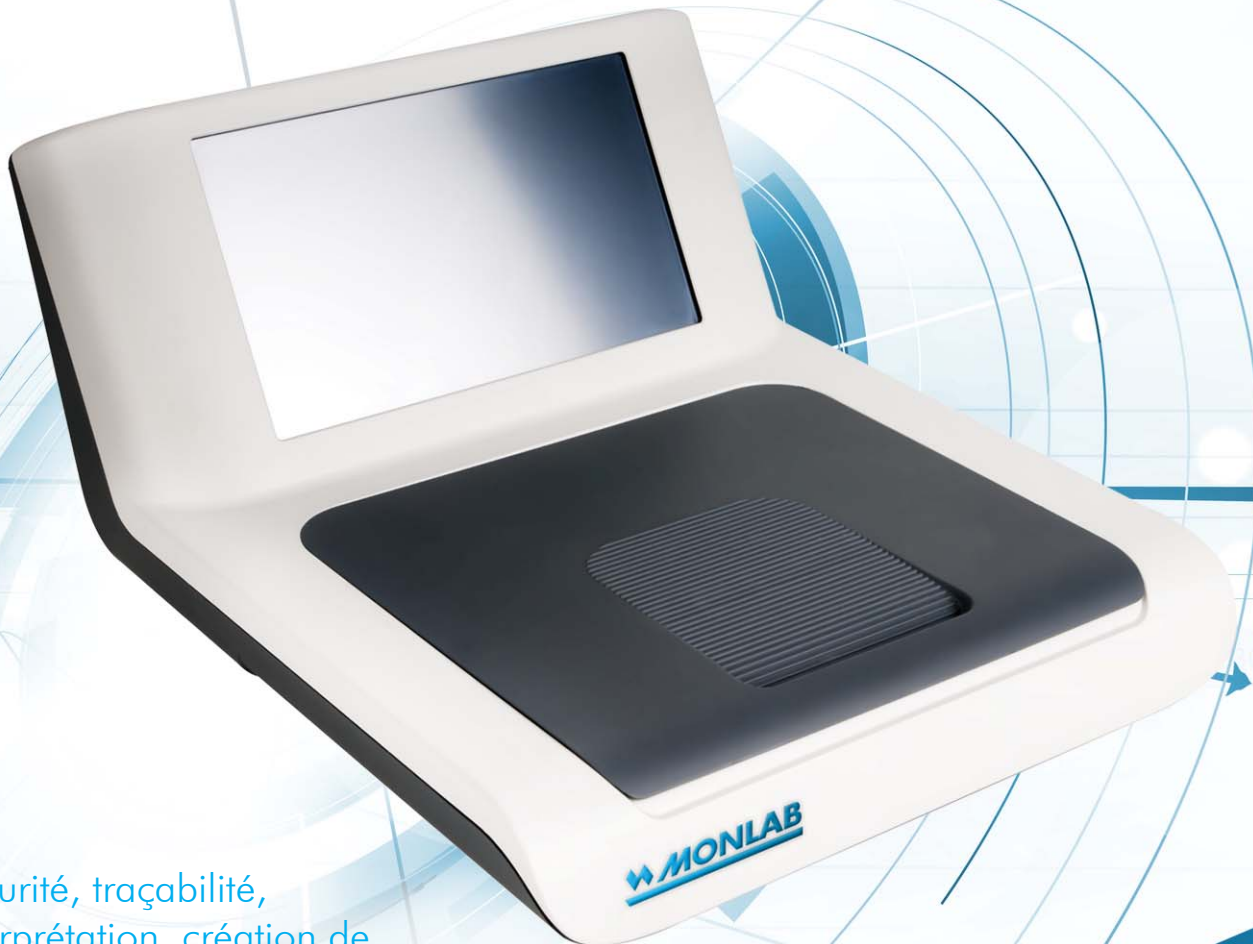

Sécurité, traçabilité,
interprétation, création de
rapports.

La solution pour votre
accréditation..



MONLAB

SERVICES POUR LABORATOIRES DE DIAGNOSTIC CLINIQUE

30 ANS
ANDS
URTEKA
YEARS



1985 - 2015



Connexions
USB - LAN

Lecture des cassettes individuelles et multiparamétrique

Respiratoire

Adénovirus Respiratoire
RSV
Influenza A+B

Fécaux

C. difficile A/B
C. difficile GDH
Rota/adénovirus
Giardia
FOB*

Urine

Legionella
Panel 5 multidrogas
Panel 10 multidrogas
Panel 12 multidrogas
hcg*
S. pneumoniae*

* Disponible en décembre 2015

Caractéristiques principales

- SkanFlexi® est un lecteur de tests rapides unitaires.
- Particulièrement utile à la lecture des cassettes monoparamétriques ou multiparamétriques telles que les tests de drogues, tests en infectieux, biochimie...
- Lecture rapide et facile. En 1 seul clic, obtention des résultats en 15 secondes. Photo scannée du test, sauvegardée dans le rapport de résultats des patients.
- Possibilité de transmettre les résultats au LIS par le port Ethernet.
- Archivage des 10 000 derniers résultats en mémoire, hors LIS.
- Ecran tactile. Prise en main rapide.
- Mise à jour du système par internet ou USB.
- 2 ports USB pour connexion d'une imprimante, d'un lecteur de code à barres, d'un clavier externe ou d'une clé USB.

Comment faire pour utiliser SkanFlexi®?



1- Ouvrir le couvercle



2- Déposer la cassette.



3- Déposer test..



4- Fermer le couvercle..



5- Procéder à la lecture



6- Attendre 15 secondes.



7- Voir les résultats, identifier l'échantillon patient et le lot réactif, ajouter des commentaires, envoyer on-line...